

一般医療機器

医療機器届出番号 13B1X10323000026

新発売

手術用被覆・保護材／圧迫性被覆・保護材

日本製

JMDNコード 34654000／34084000

ATKPAD-AID

ATKパッド-エイド

水あめの浸透圧を応用したドレッシング材




オカモト株式会社

踵部褥瘡の症例と処置例


外用剤が創部に滞留していない
周囲皮膚の汚染・浸軟

ATKパッドの使用
→創が十分に被覆され、密着

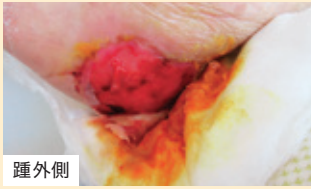


踵外側

ポビドンヨード・シュガー軟膏が
創部に滞留していない

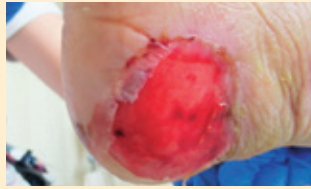

創縁の浸軟

使用開始翌日

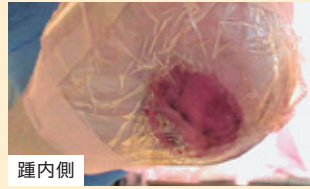

踵内側



踵外側

午前にはガーゼ交換しても、午後には滲出液があふれて皮膚も浸軟する。踵なので動かすたびにずれて、ガーゼの固定も大変です。



ATKパッドに変更してから1日1回の交換ですみます。パッドが創部に密着するのでずれもなく、処置が簡単になりました。



リンパ浮腫の処置例

※使用包帯：レジフレックスA

<包帯法手順と使用用品>

- ① スキンケア
- ② ATKパッドを患部に貼付する
- ③ ①②の写真的ように包帯などを巻く



リンパ浮腫に対する圧迫療法において、滲出液が多い創傷ではガーゼや包帯が汚染されやすくなります。ATKパッドは薄型でありながら滲出液を十分に吸収できるため、圧迫を妨げることなく被覆・保護が可能です。

ATKPAD-AID

ATKパッド-エイド



GS1バーコード

(01)04547691815255

(01)04547691815262

【警告】

明らかな臨床的創感染を有する患者には慎重に使用すること。
[感染を悪化する恐れがある。臨床的創感染を有する患者であっても感染に対する薬剤治療や全身・局所管理をしながら創傷被覆材を併用することが有益と医師が判断する場合には、局所の観察を十分に行之、慎重に使用すること。]

【禁忌・禁止】

1. 再使用禁止
2. 裁断加工禁止

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
直射日光と高温多湿を避けること
2. 有効期間
製造月から3年
使用期限：個包装及びパッケージに記載【自己認証により設定】

一般医療機器	
一般的名称	手術用被覆・保護材／圧迫性被覆・保護材
医療機器届出番号	13B1X10323000026
使用目的	①術後創傷等の創の被覆・保護 ②体液貯留の貯留予防を目的に、患部に圧力を加える弾性包帯等と併用される被覆材。最も一般的には植皮創及び熱傷治療に用いられる。
滅菌の有無	未滅菌
販売名	ATKパッド-エイド

品番	製品名	サイズ (mm)	包装	ケース入数	JANコード
ATK-A01	ATKパッド-エイド 9×13	90×130	5枚/箱	20箱	4547691815255
ATK-A02	ATKパッド-エイド 13×18	130×180	5枚/箱	20箱	4547691815262

詳細は、電子化された添付文書をご参照ください。電子化された添付文書の改訂にご留意ください。

製造販売元



オカモト株式会社

https://www.okamoto-inc.jp/
〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目27番地12号

文献請求先及び問い合わせ先

手袋・メディカル部 LX機能品課
電話：03-3817-4172
受付時間／9:00～17:00
(土日・祝日・会社休日を除く)



添付文書閲覧アプリ「添文ナビ®」を左記二次元バーコードよりインストールしてください。最新の情報は、GS1バーコードを読み取ることで閲覧出来ます。

ATK®はオカモト㈱の登録商標です。
2026年1月作成