

2004年10月1日作成（新様式第1版）

2005年8月1日改訂

医療機器届出番号	43B2X00002000002

医療用品（4）整形用品
JMDNコード 34864000
一般医療機器 救急絆創膏
オカモトMSパッドーK


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 粘着部を創傷面に当てないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は粘着中央に吸収性不織布（パッド）を貼り付け、粘着部を剥離紙で覆い、滅菌バッグに入れてエチレンオキサイドガス（EOG）で滅菌したものです。

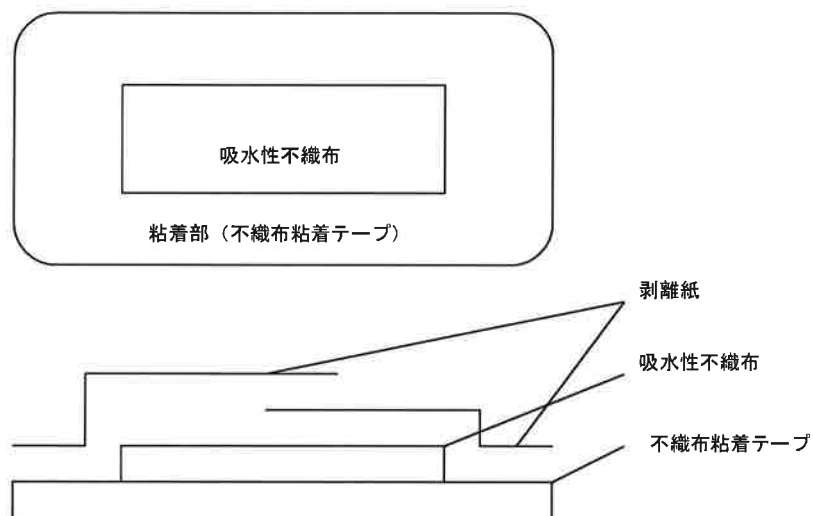

（断面図）

【使用目的・効果又は効能】

創傷面の保護

【品目仕様等】

滅菌済み

【操作方法又は使用方法等】

創傷面を清潔にして、パッド部分を創傷面にあて、周囲の粘着テープで固定してし、使用してください。

【使用上の注意】

1. 本品はE O G滅菌済みですので、使用時に開封してください。使用前に滅菌バッグが破損した場合は、使用しないでください。
2. 本品の使用により「かゆみ」「かぶれ」などが発生した場合は、使用を中止し医師又は薬剤師に相談してください。
3. パッド部が濡れたり、汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、新しいものと張り替えてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。
3. 本品はケース表示の使用期限内にご使用ください。

【包装】

品名コード	サイズ	包 装	吸収性不織布部	粘 着 部
GN201	1	100枚	25mm×30mm	45mm×50mm
GN202	2	50枚	30mm×40mm	50mm×70mm
GN203	3	50枚	30mm×60mm	60mm×90mm
GN204	4	20枚	50mm×70mm	90mm×120mm
GN205	5	20枚	50mm×100mm	90mm×150mm
GN206	6	20枚	50mm×150mm	90mm×200mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の氏名：キョーリキ株式会社

住 所：〒861-5514 熊本県熊本市飛田3丁目3-65

電 話 番 号：096-345-1234（代表）

製造業者の氏名：キョーリキ株式会社

住 所：〒861-5514 熊本県熊本市飛田3丁目3-65

電 話 番 号：096-345-1234（代表）

販売業者の氏名：オカモト株式会社

住 所：〒110-8710 東京都文京区本郷3丁目27番12号