

**2017年8月1日改訂（第3版 新記載要領に基づく改訂）

*2012年6月1日改訂（第2版）

医療機器届出番号	43B2X10001000009

医療用品（4）整形用品
JMDNコード 34864000
一般医療機器 救急絆創膏

レジバン


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 粘着部を創傷面に当てないこと。

**【形状・構造及び原理等】

本品は粘着部にポリネット付き不織布（パッド）を貼り付け、粘着部を剥離紙で覆い、滅菌紙（コールドシール）に入れてエチレンオキサイドガス（EOG）で滅菌したものです。

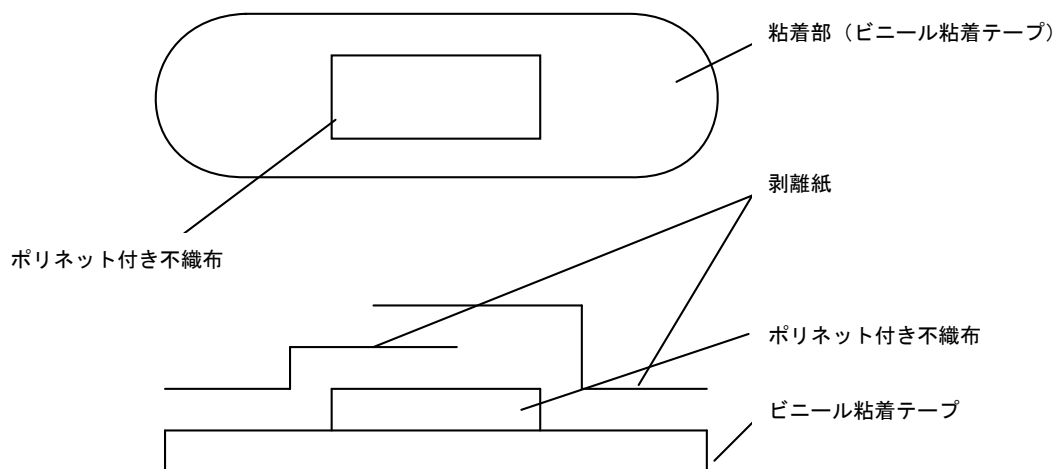

（断面図）

体に接触する部分の組成

- ・ パッド：不織布／ポリエチレンネット
- ・ 粘着テープ：ポリ塩化ビニルフィルム／アクリル系粘着剤

品名コード	サイズ	包装
GN301	19mm×72mm	200枚

**【使用目的又は効果】

創傷面の保護

****【使用方法等】**

創傷面を清潔にして、パッド部分を創傷面にあて、両側のテープで固定し、使用してください。

****【使用上の注意】**

1. 本品は、E O G滅菌済ですので、使用時に開封してください。
2. 本品の使用により「かゆみ」「かぶれ」等が発生した場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。また、以前に粘着テープ等を使用し「かゆみ」「発疹」等のあった方は十分注意して使用してください。
3. パッド部が濡れたり、汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、新しいものと貼り替えてください。
4. 粘着部を創傷面当てないでください。

****【保管方法及び有効期間等】**

<保管方法>

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。

<使用期限>

3. 本品はケースに表示[自己認証データによる]の使用期限内にご使用ください。

****【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者の氏名：キョーリキ株式会社

* 住 所：〒 861-5514 熊本県熊本市北区飛田3丁目3-65
電 話 番 号：096-345-1234（代表）

販 売 業 者 の 氏 名：オカモト株式会社

住 所：〒 113-8710 東京都文京区本郷3丁目27番12号
電 話 番 号：03-3817-4172（手袋・メディカル部）