

医療用品3 手術用手袋及び指サック
管理医療機器 天然ゴム製手術用手袋 JMDNコード 40548000

オカモト手術用手袋 パウダーフリー (曲指形)

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止
- 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ・左右別型（曲指形）
- ・表面粗面
- ・パウダーフリー
- ・サイズ：5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0
- ・滅菌済
- ・主原料：天然ゴム
(JIS T 9107の寸法の項に適合)

【使用目的又は効果】

医科及び歯科で手術に用いる場合、患者及び使用者を交差感染から保護する。

【使用方法等】

手袋は無菌的に装着してから使用する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。アレルギー性症状には、I型（即時型：天然ゴムラテックスに含まれるたん白による）、IV型（遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意する。

2. 重要な基本的注意

- 電気メス使用時に高周波回路が形成された場合、手袋の電氣的絶縁性が損なわれ熱傷することもある。
- 使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。

3. 相互作用

- 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合があるので確認の上使用する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

- 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気を避けて保管する。

2. 使用の期限

- 滅菌後4カ年
[自己認証（当社データ）による]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

オカモト株式会社
東京都文京区本郷3丁目27番12号
TEL 03-3817-4172

[製造元]

国名 タイ
業者名 サイアムオカモト株式会社
(SIAM OKAMOTO CO.,LTD.)