

医療用品3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 歯科用手袋 JMDNコード 70911000

ドクターハンドデンタルパウダーフリー

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ・ 左右別型（前指タイプ）
- ・ パウダーフリー
- ・ サイズ：5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5
- ・ 未滅菌
- ・ 主原料：天然ゴム
（JIS T9113の呼び番号及び寸法の項に適合）

【使用目的又は効果】

歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製の手袋をいう。手術に用いるものを除く。

【操作方法又は使用方法等】

手袋を箱より取り出し、手に装着して使用する。

【使用上の注意】

1.使用注意

- ・ 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。アレルギー性症状には、I型（即時型：天然ゴムラテックスに含まれるたん白による）、IV型（遅延型：主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による）がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- ・ 天然ゴムと接触する機会が多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意する。

2.重要な基本的注意

- ・ 使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。

3.相互作用

- ・ シリコン系印象材の中には、本品に触れると硬化が阻害されるものがあるので、確認の上使用すること。
- ・ 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認の上使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

1.保管方法

- ・ 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気を避けて常温で保管する。

2.使用の期限

- ・ 内箱の記載を参照のこと。
[自己認証(当社データ)により設定]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

オカモト株式会社

東京都文京区本郷3丁目27番12号

TEL：03-3817-4172

【製造】

国名 タイ

業者名 サイアムオカモト株式会社

(SIAM OKAMOTO CO., LTD)