

医療用品3 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 歯科用手袋 JMDNコード 70911000

## ドクターハンドデンタルパウダーフリー

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止
- ・天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止

#### \*【形状・構造及び原理等】

- ・左右別型(前指タイプ)
- ・パウダーフリー
- ・未滅菌
- ・主原料:天然ゴムラテックス
- ・表面仕上げ:粗面

#### 【使用目的又は効果】

歯科の診察、治療及び処置に用いるゴム製の手袋。手術に用いるものを除く。

#### 【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着する。

#### 【使用上の注意】

##### 1.使用注意

- ・天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。アレルギー性症状には、I型(即時型:天然ゴムラテックスに含まれるたん白による)、IV型(遅延型:主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による)がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施す。
- ・天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意する。

##### 2.重要な基本的注意

- ・使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。

##### 3.相互作用

- ・シリコーン系印象材の中には、本品に触れると硬化が阻害されるものがあるので、確認の上、使用する。
- ・薬品、溶剤等によっては、膨潤したり、浸透したりする場合がありますので、確認の上、使用する。

#### \*【保管方法及び有効期間等】

##### 1.保管方法

- ・水ぬれに注意し、直射日光やオゾン、高温、多湿を避けて保管する。

##### 2.使用の期限

- ・箱に記載[自己認証(当社データ)による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

オカモト株式会社

東京都文京区本郷3丁目27番12号

TEL:03-3817-4172

[製造元]

国名 タイ

業者名 サイアムオカモト株式会社

(SIAM OKAMOTO CO.,LTD)