

医療用品3 手術用手袋及び指サック
一般医療機器 天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード 70977000

オカモト検査・検診用ゴム手袋 ソフトタッチ・ラテハンド オリジナル

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 天然ゴムによるアナフィラキシー症状の既往歴がある医療関係者の使用及び患者への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

- ・ 左右同一型(平手タイプ)
- ・ パウダーフリー
- ・ サイズ: SS、S、M、L
- ・ 未滅菌
- ・ 主原料: 天然ゴム
(JIS T9115 の呼び、及び寸法の項に適合)

【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から保護する。

【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着する。

【使用上の注意】

1. 使用注意

- ・ 天然ゴムは、かゆみ、発赤、蕁麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、喘息様症状、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。アレルギー性症状には、I型(即時型:天然ゴムラテックスに含まれるたん白による)、IV型(遅延型:主に加硫促進剤等の添加剤の化学物質による)がある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- ・ 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意する。

2. 重要な基本的注意

- ・ 使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。

3. 相互作用

- ・ 薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認の上使用する。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法
 - ・ 水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や湿気を避けて常温で保管する。
2. 使用の期限
 - ・ 包装後4年 [自己認証(当社データ)による]

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

【製造販売元】

オカモト株式会社
東京都文京区本郷3丁目27番12号
TEL: 03-3817-4172

【製造元】

国名 タイ
業者名 シュンタイラバークローブズインダストリーパブリック
(Shun Thai Rubber Gloves Industry Public Co., Ltd)