

医療用品3 手術用手袋及び指サック  
一般医療機器 非天然ゴム製検査・検診用手袋 JMDNコード 70976000

## オカモト検査・検診用ゴム手袋 ソフトタッチ・ニトリルハンド0.07

### 再使用禁止

---

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

- ・左右同一型(平手タイプ)
- ・パウダーフリー
- ・サイズ:SS、S、M、L
- ・未滅菌
- ・主原料:ニトリルゴム

#### 【使用目的又は効果】

手術を除いた検査、検診、治療行為及び汚染された医療材料を取り扱う場合、患者及び使用者を交差感染から保護する。

#### 【使用方法等】

箱より手袋を取り出し、手に装着する。

#### 【使用上の注意】

- 1.使用注意
  - ・体質により発疹、湿疹、発赤、潰瘍、腫脹、かゆみ、かぶれ、しびれ等の過敏症状が現れた場合は、直ちに使用を中止し、適切な処置を施すこと。
- 2.重要な基本的注意
  - ・使用中に破損やピンホールなどの異常が認められた場合は新しい製品に交換する。
- 3.相互作用
  - ・薬品、溶剤等によっては膨潤したり、浸透したりする場合がありますので確認の上使用する。

#### 【保管方法及び有効期間等】

- 1.保管方法
  - ・水ぬれに注意し、直射日光、オゾン、高温や多湿を避けて常温で保管する。
- 2.使用の期限
  - ・箱底面に記載[自己認証(当社データ)による]

#### \*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元]

オカモト株式会社  
東京都文京区本郷3丁目27番12号  
TEL: 03-3817-4172

[製造元]

国名 マレーシア  
業者名 ハルタレガ NGC 株式会社  
(Hartalega NGC Sdn. Bhd.)