

\*\*2016年9月1日改訂（第3版 新記載要領に基づく改訂）

\*2012年6月1日改訂（第2版）

|          |                  |
|----------|------------------|
| 医療機器届出番号 | 43B2X10001000001 |
|          |                  |

医療用品（4）整形用品

JMDNコード 34864000

一般医療機器 救急絆創膏

オカモトMSテープ

再使用禁止


**【禁忌・禁止】**

- ・ 再使用禁止
- ・ 粘着部を創傷面に当てないこと。

**\*\*【形状・構造及び原理等】**

本品は、ビニール粘着テープにポリネット巻綿包を貼り付け、粘着部・パッド部を剥離紙で覆い、滅菌バッグに入れてエチレンオキサイドガス（EOG）で滅菌したものです。

|                |
|----------------|
| 粘着部（ビニール粘着テープ） |
| パッド部（ポリネット巻綿包） |
| 粘着部（ビニール粘着テープ） |

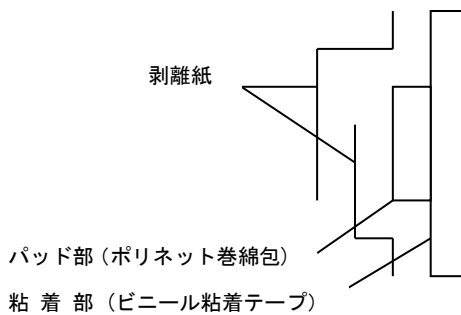

（断面図）

| 品名コード | サイズ | 包装  | パッド部       | 粘着部        |
|-------|-----|-----|------------|------------|
| GN101 | S   | 20枚 | 15mm×150mm | 40mm×150mm |
| GN102 | M   | 20枚 | 25mm×200mm | 60mm×200mm |
| GN103 | L   | 20枚 | 40mm×250mm | 80mm×250mm |

**\*\*【使用目的又は効果】**

創傷面の保護

**\*\*【使用方法等】**

創傷面を清潔にして、パッド部分を創傷面にあて、両側のテープで固定し、使用してください。

**\*\*【使用上の注意】**

1. 本品は、E O G滅菌済ですので、使用時に開封してください。
2. 本品の使用により「かゆみ」「かぶれ」等が発生した場合には、使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。また、以前に粘着テープ等を使用し「かゆみ」「発疹」等のあった方は十分注意して使用してください。
3. パッド部が濡れたり、汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、新しいものと貼り替えてください。

**\*\*【保管方法及び有効期間等】**

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。
3. 本品はケース表示の使用期限内にご使用ください。

**\*\*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者の氏名：キョーリキ株式会社

\* 住 所：〒 861-5514 熊本県熊本市北区飛田3丁目3-65  
電 話 番 号：096-345-1234（代表）

販 売 業 者 の 氏 名：オカモト株式会社

住 所：〒 113-8710 東京都文京区本郷3丁目27番12号  
電 話 番 号：03-3817-4111（代表）